

## IMMOBILISERENDE POLS-/HANDSPALK



### IMMOBILISEERT EN ONTLAST POLS EN HAND



#### INDICATIES:

Het dragen van de immobiliserende pols-/handspalk wordt aanbevolen bij polsletsels (acute fase): verstuiking, kneuzing. De spalk kan preventief gedragen worden (onderbroken gebruik bij revalidatie).

#### CONTRA-INDICATIES:

Elk letsel waarvoor een orthopedische behandeling met gips, hars of een chirurgische ingreep vereist is. De spalk mag niet rechtstreeks in contact komen met een wonde.

#### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

Lees aandachtig de informatie in de bijsluiter voordat u de enkelbandage gebruikt. In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts, apotheker of medisch personeel. Dit medisch hulpmiddel is een gezondheidsproduct dat aan de Europese wetgeving is onderworpen en van het CE-label is voorzien.

#### BIJZONDERE KENMERKEN:

De pols-/handspalk heeft een wijde opening zodat deze vlot over de hand kan worden geschoven. Hij bevat ook een aantal verstevigingselementen (boven- en onderaan) om de pols in de optimale positie te plaatsen. Met de 2 klittenbandsluitingen kunt u het vormbare verstevigingselement onder de handpalm centreren. De losse band zorgt voor een anatomische sluiting ter hoogte van de pols zodat deze optimaal geïmmobiliseerd wordt.

#### ERGONOMIE:

Aan de versteviging op de rug van de hand is er een uitsparing voorzien die elke druk op het prominente bot van de pols (styloïdeus) vermijdt. Het spalkplaatje ter hoogte van de handpalm is vormbaar en het afneembare kussentje zorgt ervoor dat uw hand in rustpositie blijft. De immobiliserende EPITACT® pols-/handspalk is heel licht en past zich perfect aan de vorm van uw hand aan. Dankzij zijn optimaal comfort kunt u uw vingers normaal blijven bewegen.

#### ONDERHOUD:

Met de hand wassen op 30°C, met een niet-agressieve zeep en zonder reinigings- of bleekmiddel. Goed spoelen. Met de hand uitwringen. Niet blootstellen aan een directe warmtebron (verwarmingstoestel, zonlicht). Geen vlekkenverwijderaars gebruiken.

**SAMENSTELLING:** 65% textiel (Polyamide, Elastaan, Polyester), 34% metaal (Aluminium, Staal), 1% Polyethyleen.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt. De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2017



Wasbaar met de hand.



Niet strijken of stomen.



Geen chemische reiniging.



Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet in de droogkast.



LOT Zie verpakking.

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

MILLET  
INNOVATION

[www.epitact.be](http://www.epitact.be)